

## PORTE-CLEFS ALCOOTEST

### NOTICE D'UTILISATION EN FRANÇAIS

#### A- Caractéristiques :

- 1- Alcotest évalué en 3 graduations
- 2- Réponse rapide
- 3- Lampe torche orange
- 4- Fonctions Chronomètre et Compte à Rebours
- 5- Fonctionne avec 2 piles 1.5v « AAA »

#### B- Installation des Piles :

- 1- Ouvrir le compartiment à piles, glisser les piles en respectant la polarité -/+
- 2- Changer les piles dès que les couleurs test ou que l'intensité de la lampe torche est faible.

#### C- Utilisation du Test d'Alcoolémie :

- 1- Rester Appuyer longuement sur le bouton POWER jusqu'à ce que le bouton READY s'illumine seul.  
En restant appuyer sur le bouton POWER, attendez 10 secondes, Prenez votre inspiration à fonds et souffler à environ 3 cm du capteur en haut du porte-clefs (vous devez souffler toute l'air inspiré doucement et pas trop rapidement et si possible sans coupure)  
N'enlever pas le doigt du bouton POWER durant toute l'opération.

- 2- Puis vérifier le test selon les couleurs :

- Bouton vert seul : Tout est OK ... vous pouvez prendre le volant sans problème. (en dessous ou égal à 0.10 mg/L BRAC)
- Bouton Jaune : Attention vous êtes à la limite au point de vue de la loi ... vous pouvez prendre le volant mais avec attention.  
(Entre 0.10mg et 0.25mg/L BRAC)
- Bouton Rouge : Attention DANGER ... vous ne devez pas prendre le volant ... vous risquez de vous mettre en danger, et les autres !!!  
(Au-dessus de 0.25mg/L BRAC)

#### D- Utilisation de la Lampe Torche :

Appuyer sur le bouton ON ...

**ATTENTION NE PAS UTILISER LA LAMPE TORCHE EN MEME TEMPS QU'UN TEST D'ALCOLEMIE. SOUS PEINE DE FAUSSER LE RESULTAT.**

**E- Fonction Chronomètre :**

- 1°) Appuyer sur les deux boutons à la fois HR et MIN l'écran affiche 0 :00
- 2°) Appuyer sur le bouton START/STOP ... le chronomètre se met en route.
- 3°) Pour mettre en pause le chronomètre appuyer de nouveau une fois sur START/STOP (et appuyer une nouvelle fois sur START/STOP pour reprendre le chronomètre)
- 4°) Pour arrêter le chronomètre appuyer de nouveau sur les deux boutons en même temps HR et MIN.
- 5°) Pour revenir au mode horloge appuyer sur les trois boutons en même temps HR, MIN et START/STOP.

**F- Fonction Compte à Rebours :**

- 1°) Appuyer sur les deux boutons à la fois HR et MIN l'écran affiche 0 :00
- 2°) Appuyer sur le bouton MIN pour afficher le nombre de minutes et HR si vous voulez faire un décompte en heure.

Ex : si vous voulez que le porte-clefs sonne dans deux minutes ... appuyer sur MIN deux fois.

Ex2 : si vous voulez que votre porte-clefs sonne dans 1 h 30 (pour la cuisson d'un gros poulet par exemple ;)

Appuyer une fois sur HR et sélectionner 30 minutes avec la touche MIN.

- 3°) Appuyer sur la touche START/STOP une fois pour mettre en route le compte à rebours une fois le temps programmé.

- 4°) Pour mettre en pause le compte à rebours appuyer une nouvelle fois sur la touche START/STOP (et appuyer encore une fois sur la touche START/STOP pour faire repartir le compte à rebours)

**A LA FIN DU DECOMPTE ... LE PORTE-CLEFS SE MET A SONNER .... POUR ARRETER LA SONNERIE APPUYER UNE FOIS SUR LE BOUTON START/STOP.**

- 5°) Pour arrêter le compte à rebours appuyer sur les touches HR et MIN en même temps.

**AUTRES RENSEIGNEMENTS :**

- 1- Attention de bien laisser appuyer le bouton POWER durant le test d'alcoolémie.
- 2- Au cas de longue période de non utilisation de l'appareil, enlever les piles.  
Les leds jaune et rouge peuvent rester allumer ... faites plusieurs essais jusqu'à ce que la procédure normale redémarre.
- 3- Lorsque les piles sont usées, les lumières leds deviennent faibles, remplacer alors les piles.
- 4- Après avoir bu, il est recommandé d'attendre environ 20 minutes avant de faire le test... il faut environ 20 minutes pour que l'alcool passe dans le sang et soit diffusée par le souffle expiré.
- 5- Pour ne pas faussé le résultat, il est recommandé de ne pas manger et de ne pas fumer dans les 20 minutes précédent le test.
- 6- Pour effectuer un nouveau test, attendez environ 3 minutes.
- 7- Ne pas utiliser de produits chimiques pour nettoyer la buse test,  
Ne pas verser d'eau dans la buse.
- 8- Essuyer la buse avec un chiffon doux et sec.